







Stapsgewijze instructies voor het gebruik van een niet-medisch masker TX24

1.	Was uw handen voor u het masker opdoet.	
2.	Wanneer u het opdoet, raak dan alleen het elastiek of de strik aan. Voor een masker met twee elastieken/strikken achter het hoofd: plaats eerst het onderste elastiek/strik en daarna de bovenste.	
3.	Zorg ervoor dat uw mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak ze daarna niet meer aan.	
4.	Draag het masker maximaal 3 uur per keer.	
5.	Schuif het masker niet naar onder of boven om te eten, drinken of praten.	
6.	Was uw handen voordat u het masker verwijdert.	
7.	Raak bij het verwijderen van het masker alleen het elastiek of de strik aan. Voor een masker met twee elastieken/strikken achter het hoofd: verwijder eerst de bovenste en daarna de onderste.	
8.	Bewaar schone en gebruikte maskers apart van elkaar in verschillende verzegelde zakken of bakken.	
9.	Was uw handen na het verwijderen van het masker.	

Instructies voor het onderhoud van een niet-medisch masker

1.	Was het masker na elk gebruik op minimaal 60 °C met een volledig wasprogramma.	
2.	Niet bleken	
3.	Drogen in de droogtrommel op lage temperatuur	
4.	Niet strijken	
5.	Was alleen met wasmiddel; voeg geen wasverzachter toe.	
6.	Was uw handen nadat u het masker in de wasmachine heeft gedaan.	

Bewaarinstructies:

- Bewaar bij een temperatuur die niet hoger is dan 25 ° C met een maximale relatieve vochtigheid van 80%.
- Blijf uit de buurt van lichtbronnen. Bewaar niet langer dan 1 maand bij gemiddelde condities die hoger liggen dan aangegeven.

Overige:

- Het elastiek kan latex bevatten
- Naaigaren van 100% polyester
- Maximum aantal wasbeurten: 45 tot maximaal 70 keer

Waarschuwingen:

- Dit niet-medische masker mag niet worden gebruikt door kinderen van 3 jaar of jonger vanwege verstikkingsgevaar. Het wordt aanbevolen dat kinderen van 4 tot 12 jaar het masker alleen onder toezicht dragen.
- Het dragen van een niet-medisch masker kan verstikkend aanvoelen, vooral in het begin.
- Let op: zware inspanning (bijv. intensieve training) is zeker niet mogelijk bij het dragen van een masker.
- Gebruik het niet-medische masker niet als het beschadigd is (bijv. als het niet meer past, vervormd is of versleten).
- Dit niet-medische masker is noch een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42 / EEC, noch persoonlijke beschermingsmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2016/425.



Manufactured by Creazioni Futura S.r.l. Italy - www.creazionifutura.com - **Certified ISO 9001:2008 & EN ISO 13485:2012.**

Dealers Benelux:

Emedis - www.e-medis.eu - T: +31 6 30347673

De Vos Surgical - www.dvsurgical.nl - T: +31 85 065 4171

Endo Direct - www.endodirect.nl - T: +31 85 1303268